Ran's Nightをご使用になる前に

1.データを蓄積するRan's Storyに入会します

パソコンと携帯で使う方	携帯のみで使う方
Ran's Storyサイトhttp://rans-story/jp から入会登録	携帯からRan's Storyに入会登録 http://rans-story/jp
ログイン後[設定変更]→[携帯メールアドレス登録]	 をのQRコードを撮影してサイトにアクセス 「メールでかんたん登録」をクリックして空
届いたメールからアクセスし、ログイン画面をブック マーク(お気に入り)に登録	メールを送信、届いたメールからアクセスし していた 、 した 、
携帯アドレスとパスワードを入力してログイン	ログイン画面をブックマーク(お気に入り)に登録
トップ画面下方より[かんたんログイン設定]	トップ画面下方より[かんたんログイン設定]

2.Ran's Night機器IDをRan's Storyに登録します



3.日付と時刻を合わせます



年、月、日、時、分を合わせたら「けってい」に カーソルを置き、セットボタンを押します 時刻は「24時間表示」です

4.スケジュールを設定します



おおよそいつも眠っている「時間帯」に合わせます 毎日セットし直す必要はありません 朝9時を過ぎると、温度が上がりすぎるので、遅く ても「2じから8じまで」の設定をおすすめします

電池のセット方法やお取り扱い上の注意など、詳しい操作方法については、「取扱説明書」をご確認下さい 「保証書」は取扱説明書に印刷されております。お買上日がわかる領収証等を張り付けて保管して下さい



肌に直接、または、薄手の下着の上から(布1枚程度なら 間に入ってもOK)毎日ほぼ同じ条件で装着してください



身体にフィットさせ、パジャマや腹巻でカバーしたり 掛け布団でしっかり覆うことが上手に測るコツ!

計測スケジュール時間内はボタン操作をしないで下さい



送信は?

朝起きてから日中の間に、真ん中の「セットボタン」を 押し、データをQRコードで表示します 携帯電話の「バーコードリーダー」で読み取って、ク リックするとRan's Storyにアクセスします 「かんたんログイン」をすると、データ送信が完了



QRコード表示中に「ダウンボタン」を押すと、前日の QRコードを表示することができます



	毎日の記録は、「マ	?イダイアリー」から行います
月経開	閉始日、 色/量も記録	「 マイレコード 」で周期毎 の一覧が表示されます
	47/2 - 4.4422 0 000 41** Ubasility	
'マイ , 今日	ステージ」で はここ!とお知らせ	
	Autor Inc.	
キューオーエル株式会社〒386-1211http://www.QOL21.com長野県上田市下之郷813-12TEL(代表)0268-39-7735		
お客様 10268-75-2380 サポート ≤ support@QOL21.com		

受付時間:午前9時30分~午後5時30分(土・日・祝日及び夏期・冬期の休暇期間を除く)